

Premier PLUS

AquaJoy Premier PLUS

Le siège élévateur Premier PLUS d'AquaJoy a été développé et conçu en pensant à vous !

Ergothérapeutes / Responsables de magasins: [COMPLÉMENTS](#) | [FONCTIONS](#) | [CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES](#)



Le Premier PLUS d'AquaJoy est un siège élévateur en deux parties, qui fonctionne à l'aide d'un accumulateur. Il peut être électroniquement incliné ou arrêté au goût du client, permettant à chacun de choisir la position de bain qui lui est plus confortable. La simplicité d'usage, du début à la fin de l'utilisation, évite aux clients toute confusion.

Le Premier PLUS d'AquaJoy est le siège élévateur le plus facile à monter et démonter, assurant à tous une grande facilité d'utilisation et de transport. Muni de pieds à ventouses facilement décollables, le siège élévateur peut être retiré de la baignoire sans difficulté. La commande manuelle, entièrement imperméable et flottante, contient une pile et possède de grands boutons bleus, concaves et convexes, ainsi qu'un voyant lumineux et un chargeur facile et simple à utiliser.

Limité à une charge de 170 kg, le siège élévateur convient également aux clients les plus lourds. Disponible avec ou sans housses, la polyvalence du Premier PLUS d'AquaJoy garantit l'adéquation à tous types de clients.



Les housses standard, lavables et facilement déhoussables sont rembourrées et confortables. En option, des housses garnies de gel pour un confort supplémentaire sont disponibles pour prendre soin des clients de poids léger et de tension faible. Elles offrent une solution alternative pour répondre aux besoins plus spécifiques.

La gamme d'accessoires d'AquaJoy (comprenant harnais de soutien du haut du corps, disque pivotant, appui-tête, harnais de soutien genoux et poitrine, housses en option, pommeau, coussin de cale, sac de transport) peut être ajoutée à n'importe quel siège élévateur Premier standard PLUS. Elle offre un usage polyvalent aux clients et un meilleur service de prêt de matériel. Des fixations latérales sont incluses gratuitement dans chaque boîte et des ventouses supplémentaires peuvent être ajoutées pour sièges élévateurs utilisés sur surfaces irrégulières.

Premier PLUS - Fonctions

- Siège élévateur portatif, compact, constitué de deux parties et électroniquement inclinable.
- Siège élévateur le plus facile à monter et à démonter
- Charge max. standard : 170 kg
- Utilisation simple, poids léger, commande manuelle entièrement imperméable et flottante
- Boutons confort, convexes et concaves
- Chargeur facile d'emploi
- Disponible avec ou sans housses (disponibles en blanc, bleu ou beige)
- En option et en exclusivité, housses garnies de gel
- Pieds à ventouse facilement décollables

Premier PLUS - Caractéristiques Techniques

- Longueur du siège : 580 mm
- Largeur du siège avec rabats latéraux déployés : 686 mm
- Largeur du siège avec rabats latéraux repliés: 390 mm
- Hauteur du siège en position la plus basse : 80 mm
- Hauteur du siège en position la plus élevée : 460 mm
- Profondeur du siège à partir du dossier jusqu'au bord avant du siège : 490 mm
- Hauteur du dossier : 604 mm
- Largeur du dossier : 340 mm
- Capacité de charge : 170 kg
- Poids total sans accumulateur : 12,5 kg
- Poids du siège : 7,4 kg
- Poids du dossier : 5,1 kg
- Poids de la commande manuelle : 664 g
- Durée d'un transfert (charge de 80 kg) : Montée environ 50sec, descente environ 35sec
- Tension d'alimentation: 13.2V CC. Consommation courant maximum de 6A. Chargement : Entrée nominale: 13.2V CC
- Niveau sonore sans la charge : environ 50dB (DIN 3746). Equipement médical type B. Classe de protection: IP 66
- Cycle d'utilisation : Maximum 5%, maximum 3min./heure
- Accumulateur : 13.2V 1300mAh (Ni-MH). Chargeur de l'accumulateur : Entrée : 240V AC/50Hz, 230V AC/60Hz, 110V AC/60Hz. Sortie: 18V CC 250mA/4.5VA. Poids : 0.3kg (UK 282g /EU 285g /USA 275g)
- Temps de chargement de l'accumulateur déchargé : environ 4h



- **Avez-vous besoin d'un siège éleveur pour vous incliner et d'un siège éleveur pour vous asseoir tout droit ?**

Le premier PLUS d'AquaJoy fait les deux - le dernier siège éleveur "2 en 1".



- **Avez-vous besoin d'un siège éleveur équipé de housses et d'un siège éleveur sans housses ?**

Le Premier PLUS d'AquaJoy peut être utilisé avec ou sans housses.



- **Avez-vous besoin d'un siège éleveur d'une grande capacité de résistante au poids ?**

La charge standard maximum du Premier PLUS d'AquaJoy est de 170 kg.



- **Avez-vous besoin d'un siège éleveur qui soit extrêmement facile à monter et à démonter ?**

Le Premier PLUS d'AquaJoy a été conçu en accordant une attention primordiale à la simplicité d'installation pour les utilisateurs et les aides à domicile.



- **Avez-vous besoin d'un siège éleveur muni d'une télécommande manuelle conçue par le client et pour le client ?**

La commande Premier PLUS entièrement imperméable, légère et flottante d'AquaJoy possède de grands boutons 'confort', convexes et concaves, idéaux pour les clients arthritiques ou partiellement aveugles. La connexion des deux câbles est de type mâle/femelle et donc extrêmement simple à utiliser.



- **Avez-vous besoin d'un siège éleveur facile à installer dans la baignoire et à l'en enlever, mais également d'un siège éleveur stable à tout moment ?**

Les pieds à ventouse, facilement décollables, de Premier PLUS d'AquaJoy, permettent aux clients et aux aides à domicile d'enlever leur siège éleveur plus facilement, tout en assurant la stabilité et l'adhérence à tout moment. Pieds supplémentaires à ventouse disponibles sur demande



- **Avez-vous besoin d'un siège éleveur qui s'adapte aux baignoires peu commodes - étroites, profondes ou d'angles ?**

Le Premier PLUS d'AquaJoy a été conçu pour s'adapter même aux baignoires les moins pratiques. Avec une armature étroite de 385 mm, une hauteur maximum de 460 mm et une largeur de siège de 686 mm, le siège éleveur de premier PLUS d'AquaJoy est d'une versatilité inégalée.

- **Avez-vous besoin d'un siège éleveur pouvant être équipé d'accessoires supplémentaires pour répondre à différents types de besoins?**

Le modèle standard de Premier PLUS d'AquaJoy peut se compléter de rabats supérieurs de soutien du corps, d'un appui-tête, d'un disque pivotant et coulissant, d'un harnais de maintien des genoux et de la poitrine, d'un coussin de cale, d'un pommeau et d'un sac de transport. Ceci offre de plus de choix, de polyvalence et de rentabilité.

Accessoires

Afin d'optimiser l'usage de votre siège élévateur Aquajoy, nous disposons d'une gamme d'accessoires complémentaires.

Housse de dossier garnie de gel	AQJA0005G
Housse de dossier exclusive, garnie de gel. Pour un rembourrage et un confort supplémentaires.	
Housse de siège garnie de gel	AQJA0006G
Housse de siège exclusive, garnie de gel. Pour un rembourrage et un confort supplémentaires.	
Appui-tête	AQJA0007
Appui-tête. Fournit appui et confort supplémentaires pour le bain.	
2 rabats latéraux pour le haut du corps .	AQJA0009
Soutien du haut du corps. Fournit appui et sécurité supplémentaires.	
Vaseline de Pivotement /Coulissement	AQJA0012
Pivotement /Coulissement. Facilite le transfert sur et hors du siège élévateur.	
Harnais de poitrine	AQJA0016C
Sécurité assurée à tout moment.	
Harnais de genoux	AQJA0016L
Sécurité assurée à tout moment.	
Paire de ventouses centrales	AQJA0019
Pieds centraux à ventouses, pour adhérence supplémentaire, si nécessaire. Ces articles sont vendus par deux uniquement.	
Pommeau	AQJA0021
Pommeau. Empêche le glissement.	
Coussin de cale	AQJA0022
A poser sous des genoux pour empêcher de glisser	
Sac de transport	AQJP0004
Le mode idéal et simple de stocker votre siège élévateur. Si vous partez en vacances, pourquoi ne pas emporter votre siège élévateur avec vous ?	